

Dane Importera / Dystrybutora:
TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW
UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

Nazwa produktu: Gryzak Logopedyczny dla Dzieci i Dorosłych

Materiał: Silikon

Ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Gryzak Logopedyczny dla Dzieci i Dorosłych

Opis Produktu

Gryzak logopedyczny to specjalistyczne narzędzie terapeutyczne przeznaczone do użytku w logopedii. Produkt został zaprojektowany w celu wspomagania terapii mowy oraz rozwoju aparatu artykulacyjnego u dzieci i dorosłych. Gryzak wykonany jest z bezpiecznego, nietoksycznego materiału, który jest delikatny dla jamy ustnej, a jednocześnie trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Obostrzenia

- Nie używać produktu bez nadzoru osoby dorosłej: Gryzak powinien być stosowany pod nadzorem dorosłego, szczególnie w przypadku małych dzieci.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia produktu: Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia lub odkształcenia wymagają natychmiastowej wymiany gryzaka.
- Nie stosować w przypadku alergii na materiały: Produkt wykonany jest z silikonu medycznego; w razie wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu do innych celów niż zamierzony: Gryzak logopedyczny powinien być stosowany wyłącznie do celów terapeutycznych.

Przechowywanie

- W suchym i czystym miejscu: Gryzak należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Z dala od źródeł ciepła: Unikać przechowywania produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kuchenki.
- W szczelnie zamkniętym pojemniku: Aby zapobiec zanieczyszczeniu, gryzak najlepiej przechowywać w zamkniętym pojemniku lub opakowaniu.

Konserwacja

Regularne mycie: Gryzak należy myć regularnie wodą z mydłem lub w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Można również stosować specjalistyczne środki do dezynfekcji artykułów dziecięcych.

Unikanie środków chemicznych: Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych narzędzi do czyszczenia.

Sterylizacja: Gryzak można sterylizować przez zanurzenie we wrzącej wodzie na kilka minut, ale nie należy go wkładać do mikrofalówki ani zmywarki, jeśli producent nie zaleca inaczej.

Przeciwwskazania do używania produktu

Uszkodzenia zębów: Osoby z uszkodzonymi zębami, wrażliwymi dziąskami lub innymi problemami stomatologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem gryzaka.


Alergie: Nie stosować w przypadku stwierdzonych alergii na materiały użyte w produkcie, takie jak silikon.

Zaburzenia neurologiczne: Osoby z zaburzeniami neurologicznymi, które mogą wpływać na kontrolę mięśni jamy ustnej, powinny używać gryzaka tylko po konsultacji z terapeutą lub lekarzem.

Brak nadzoru: Nie stosować bez nadzoru dorosłych w przypadku dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia lub niewłaściwego użycia.

Informacje dodatkowe

Gryzak logopedyczny nie jest produktem medycznym przeznaczonym do wspomagania terapii mowy. Regularne używanie gryzaka może wspierać rozwój aparatu artykulacyjnego, jednak powinno być częścią kompleksowej terapii prowadzonej przez wykwalifikowanego logopedę. Produkt posiada certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa dla artykułów dziecięcych.

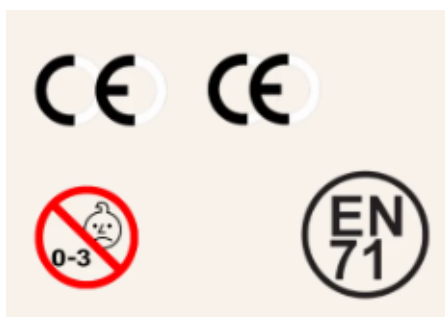

Hangzhou Yusheng technology CO.,LTD

Add: No.599 Changhe Road, binjiang district, hangzhou, China

Mobile: (86) 15158051602

Email: rita@cutepetcenter.com

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We Hangzhou Yusheng technology CO.,LTD

Hereby declare that following device are conformity
with the requirement of

EN71-1:2014

EN71-2:2011+A1: 2014

EN71-3:2013+A1:2014

Product: SPEECH THERAPY TEETHER

Hangzhou Yusheng technology CO.,LTD



Date: 2024/5/8

Signature: Rita hu